

Singclean test - manuál

- Přiloženou zkumavku umístěte do stojánku a připravte do ní roztok: lahvičku s reakčním roztokem otevřete ukroucením závěru, stiskněte lahvičku a do extrakční zkumavky nakapejte 6 kapek aniž byste se dotýkali okraje zkumavky.
- Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:
 - zasune tampon do nosní dírky přibližně 2,5 cm hluboko,
 - přejeďe jí 5x podél sliznice nosní dírky, aby se získalo co nejvíce sekretu
 - tento postup opakuje stejným tamponem i u druhé nosní dírky,
 - dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru.
- Dle pokynů dohlížející osoby každý testovaný sám pokračuje krokem vyhodnocení testu:
 - vloží tampon se vzorkem do extrakční zkumavky s předem připraveným reakčním roztokem a otočí jej asi 10x.
 - Zatlačí hlavu tampónu na stěnu zkumavky a poté ji nechá stát asi 1 minutu. - -
 - Stiskne prsty zkumavku a vytahujte tampon, aby z něj vyteklo co možná nejvíce kapaliny,
 - nainstaluje kapátko na extrakční zkumavku, pevně ji uzavře a nechá znovu 1 minutu stát.
 - Vezme připravenou testovací kazetu, nakape 3 kapky odstátého reakčního roztoku se vzorkem do otvoru pro vzorek v testovací kazetě.
 - Dohlížející osoba spustí odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

Nevyhodnocujte test po uplynutí 20 minut.

Žáci čekají na svém místě na uplynutí časového limitu.